

Componente și verificare

Identificați elementele A-C înainte de montaj.



Fotoliu rulant cu toaletă JL609

Cadru pliabil din oțel-carbon, șezut detașabil și găleată montată sub placa șezutului.

- Cadru oțel-carbon
- Șezut detașabil
- Max. 100 kg

Blocați roțile înainte de transfer sau igienizare.

Elemente livrate pentru montaj

A

Cadru pliabil

1 buc.

B

Placă de șezut detașabilă

1 buc.

C

Găleată detașabilă

1 buc.

Dimensiuni esențiale

LĂȚIME DESCHIS

63 cm

LĂȚIME PLIAT

24 cm

ȘEZUT

45 x 44 cm

ÎNĂLȚIME ȘEZUT

52 cm

LUNGIME TOTALĂ

104 cm

SARCINĂ MAXIMĂ

100 kg

Înainte de utilizare

- Verificați cadrul, șuruburile și funcționarea sistemelor de blocare.
- Confirmați fixarea plăcii și poziționarea corectă a găleții.
- Testați stabilitatea pe o suprafață plană.

Igienă și depozitare

- Scoateți găleata și placa detașabilă înainte de curățare.
- Folosiți o soluție delicată; evitați agenții agresivi.
- Uscați complet și depozitați produsul într-un mediu uscat.

IMPORTANT

Blocați roțile înainte ca utilizatorul să se așeze sau să se ridice. Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.

Montaj în 3 pași

Folosiți literele A-C din lista de pe pagina 1.

1



Deschideți cadrul A

Scoateți produsul din ambalaj, depărtați lateralele și apăsați șezutul până când cadrul este complet deschis.

Cadrul trebuie să rămână complet deschis și stabil.

2

Montați placa B



Așezați placa detașabilă pe cadrul șezutului și apăsați uniform până când este bine fixată.

3

Introduceți găleata C



Glisați găleata sub placa șezutului și verificați ca marginea acesteia să fie susținută corect.

VERIFICARE FINALĂ

Placa și găleata trebuie să rămână stabile, fără joc sau înclinare.

Blocați roțile înainte de transfer și nu utilizați produsul dacă o componentă este deteriorată. După fiecare utilizare, scoateți și igienizați găleata, apoi clătiți și uscați complet toate suprafețele.

ÎNTREȚINERE

Verificați periodic șuruburile, cadrul și roțile. Păstrați fotoliul într-un spațiu uscat și ventilat.

Nu folosiți soluții abrazive și nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.