

Componente și specificații

Verificați cele patru elemente înainte de montaj.



Scaun cu toaletă și roți JL696

Cadru pliabil din oțel cromat, găleată detașabilă și înălțime reglabilă în 5 trepte.

● Sarcină max. 100 kg

● Roți pivotante 3 inch

● Frâne spate

Elemente livrate pentru montaj

A

Cadru pliabil

1 buc.

B

Colac

1 buc.

C

Capac

1 buc.

D

Găleată
detașabilă

1 buc.

Dimensiuni și capacitate

LĂȚIME TOTALĂ

52 cm

ADÂNCIME TOTALĂ

55 cm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ

75-85 cm

ȘEZUT

42 x 40 cm

ÎNĂLȚIME ȘEZUT

47-57 cm

ÎNĂLȚIME SPĂTAR

30 cm

DIAMETRU ROȚI

3 inch

SARCINĂ MAXIMĂ

100 kg

IMPORTANT

Toate cele patru picioare trebuie reglate la aceeași înălțime înainte de utilizare.

Înainte de utilizare

- Verificați cadrul, șuruburile și stabilitatea produsului.
- Blocați roțile spate înainte ca utilizatorul să se așeze.
- Confirmați fixarea colacului, capacului și găleții.
- Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.

Utilizare și igienă

- Reduceți viteza la viraje pentru a evita răsturnarea.
- Goliți și curățați găleata după fiecare utilizare.
- Dezinfectați suprafețele cu produse compatibile.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și ventilat.

Montaj și reglare

Asamblați produsul pe o suprafață plană, cu roțile blocate.

1

Deschideți cadrul



Desfaceți cadrul complet și verificați poziționarea barelor laterale.

2

Montați găleata



Introduceți găleata în suportul de sub șezut și lăsați mânerul accesibil pentru golire.

3

Așezați colacul și capacul



Poziționați colacul pe cadrul superior și fixați capacul în punctele de prindere.

4

Reglați înălțimea



Apăsăți știfturile și selectați același nivel pe toate cele patru picioare.

CONTROL FINAL

Cadrul trebuie să fie complet deschis, stabil și fără joc la îmbinări.

Verificați blocarea știfturilor de reglare și a roților spate. Colacul, capacul și găleata trebuie să fie bine poziționate înainte de transfer.

Nu utilizați produsul dacă o componentă este deteriorată sau nu se fixează complet.