

Deschidere și pliere în 6 pași

Urmați pașii în ordine și țineți degetele departe de articulațiile mobile.



Scaun rulant pliabil JL809

Pentru utilizare la interior și exterior

- Sarcină maximă: 100 kg
- Spătar pliabil
- Cotiere de sprijin
- Cadru pliabil
- Frâne pe roțile spate
- Suporturi detașabile

Pregătire și pliere

1

Ridicați spătarul



Trageți mânerul în sus până când spătarul ajunge vertical și se fixează.

2

Deschideți cadrul



Țineți cotierele și depărtați ușor lateralele scaunului.

3

Fixați șezutul



Apăsați marginile șezutului, cu degetele orientate spre interior, până la deschiderea completă.

4

Montați suporturile



Așezați suporturile pe bolțurile de prindere și rotiți-le până când se blochează.

5

Pregătiți plierea



Ridicați tălpile suporturilor pentru picioare în poziție verticală.

6

Pliati cadrul



Trageți șezutul în sus, apropiați lateralele și pliați spătarul din mecanism.

Utilizare, siguranță și întreținere

Blocați frânele înainte de transfer și verificați produsul înainte de fiecare utilizare.

Componente principale



- Spătar pliabil
- Cotiere de sprijin
- Frâne roți spate
- Roți spate mari
- Roți frontale pivotante
- Suporturi pentru picioare

Înainte de utilizare

- 1 Verificați cadrul, spătarul, șezutul și elementele de fixare.
- 2 Controlați frânele, roțile și starea anvelopelor.
- 3 Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.
- 4 Nu utilizați produsul dacă este umed sau deteriorat.

IMPORTANT

Nu vă sprijiniți și nu călcați pe suporturile pentru picioare.

Transfer și utilizare

1

Poziționare

Apropiati scaunul de pat sau de suprafața de transfer.

2

Blocare

Acționați frânele și ridicați suporturile pentru picioare.

3

Transfer

Sprijiniți-vă numai de cadru și coborâți controlat pe șezut.

Siguranță

- Țineți degetele departe de articulații și goluri în timpul plierii.
- Nu vă sprijiniți de cotiere sau de alte componente detașabile.
- Treptele, bordurile și obstacolele se abordează numai cu un asistent instruit.
- Opriti utilizarea dacă frânele nu funcționează sau cadrul este instabil.

Curățare și întreținere

- Curățați tapițeria, cadrul, roțile și frânele cu apă și săpun.
- Uscați complet produsul; nu îl utilizați cât timp componentele sunt umede.
- Nu folosiți acizi, soluții alcaline, acetonă, diluant sau alți solvenți.
- Evitați ploaia, dușul și expunerea prelungită la soare; verificați periodic anvelopele și spițele.