

Înainte de utilizare

Fotoliu rulant pliabil, pregătit pentru utilizare fără montaj de componente.



Fotoliu rulant pliabil JL868

Cadru pliabil, roți spate pentru autopropulsare și tapițerie textilă în carouri.

- Sarcină max. 100 kg
- Utilizare la interior și exterior

Deschidere și pliere rapidă, fără unelte.

Caracteristici principale

CADRU
pliabil

ROȚI SPATE
autopropulsare manuală

ROȚI FAȚĂ
pivotante

FRÂNE
acționare laterală

SUPORT PICIOARE
frontal, rabatabil

TAPIȚERIE
material textil

Verificări esențiale

Starea produsului

- Verificați cadrul, îmbinările și mecanismele de pliere.
- Testați ambele frâne și inspectați roțile pentru uzură.
- Confirmați că șezutul și spătarul nu prezintă rupturi.

Transfer sigur

- Apropiați fotoliul de pat sau de scaunul de transfer.
- Blocați frânele și ridicați suportul pentru picioare.
- Sprijiniți-vă de cadru și solicitați ajutor dacă este necesar.

IMPORTANT

Nu vă sprijiniți și nu stați în picioare pe suportul pentru picioare.

Curățare și întreținere

- Curățați tapițeria, cadrul și roțile cu apă și săpun; uscați complet.
- Nu expuneți produsul direct la ploaie, duș sau soare puternic.
- Nu folosiți acizi, soluții alcaline, acetona sau diluant.
- Verificați periodic frânele, roțile și starea tapițeriei.

Deschidere, pliere și transfer

Verificați stabilitatea cadrului și urmați pașii în ordine.

1

Deschideți cadrul



Trageți ușor cotierele în lateral și apăsați marginile șezutului până la deschiderea completă.

2

Pregătiți suportul pentru picioare



Ridicați suportul înainte de transfer și coborâți-l numai după așezarea utilizatorului.

3

Blocați frânele și efectuați transferul



Apropiati fotoliul, acționați ambele frâne și coborâți utilizatorul lent, cu sprijin pe cadru.

4

Pliați fotoliul



Ridicați suportul pentru picioare și trageți șezutul în sus cu ambele mâini; feriți degetele de articulații.

SIGURANȚĂ

Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg și nu utilizați produsul dacă frânele nu funcționează.

Bordurile și scările se abordează numai cu ajutorul unui însoțitor instruit. Nu folosiți piese detașabile drept punct de sprijin la transfer.

În timpul plierii, țineți mâinile și degetele la distanță de îmbinările cadrului.