

Componente și verificare

Identificați piesele A-H înainte de a pregăti produsul pentru utilizare.



Scaun de toaletă pliabil JL894L

Picioare reglabile, vas detașabil și tălpi antiderapante

● Cadru pliabil

● Reglaj pe înălțime

● Sarcină max. 100 kg

Lista pieselor A-H

A



Cadru pliabil

1 buc.

E



Cotiere buretate

2 buc.

B



Capac

1 buc.

F



Tub transversal

1 buc.

C



Colac

1 buc.

G



Picioare reglabile

4 buc.

D



Vas detașabil

1 buc.

H



Tălpi antiderapante

4 buc.

Date esențiale

SARCINĂ MAXIMĂ

100 kg

CADRU

pliabil

VAS

detașabil

REGLAJ

4 picioare

SUPRAFAȚĂ

plană și stabilă

DEPOZITARE

spațiu uscat

IMPORTANT

Toate cele patru picioare trebuie reglate la aceeași înălțime înainte de utilizare.

Înainte de utilizare

- Deschideți complet cadrul și fixați tubul transversal.
- Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.

Utilizare sigură

- Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.
- Verificați poziționarea vasului și a colacului.

Pregătire în 4 pași

Urmați ordinea indicată și verificați stabilitatea înainte de utilizare.

1

Deschideți cadrul



Rotiți cadrele cotierelor din poziția pliată până când sunt aliniate.

2

Blocați tubul transversal



Ridicați tubul F și introduceți complet clemenele sale în cadrul scaunului.

3

Montați vasul și colacul




Introduceți vasul D, apoi așezați colacul C și capacul B în poziția corectă.

4

Reglați picioarele



Fixați toate cele patru picioare G la aceeași înălțime și verificați tălpile H.

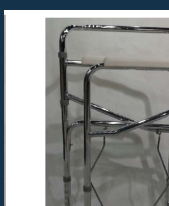

Pliere și depozitare

Scoateți capacul, colacul și vasul. Coborâți tubul transversal, apoi pliați cadrele cotierelor.

Curățați și dezinfectați periodic; uscați complet produsul înainte de depozitare.