

Componente și verificare

Identificați piesele A-D înainte de a începe montajul.



Rolator pliabil cu scaun și coș JL966LH

Cadru din oțel, mânere reglabile și sistem de frânare

● Patru roți Ø15 cm

● Scaun tapițat

● Sarcină max. 110 kg

Lista pieselor A-D

A



Cadru pliabil cu scaun și roți

1 buc.

B



Mâner reglabil cu frână

2 buc.

C



Spătar

1 buc.

D



Coș metalic

1 buc.

Date esențiale

SARCINĂ MAXIMĂ

110 kg

GREUTATE ROLATOR

7,3 kg

ÎNĂLȚIME MÂNERE

80-92 cm

ÎNĂLȚIME SCAUN

55 cm

LĂȚIME ÎNTRE MÂNERE

46 cm

LĂȚIME PLIAT

24 cm

IMPORTANT

Reglați ambele mânere la aceeași înălțime și strângeți complet butoanele de fixare.

Înainte de utilizare

- Deschideți complet cadrul și coborâți scaunul.
- Verificați frânele, roțile și toate fixările.

Utilizare sigură

- Blocați frânele înainte de a vă așeza.
- Nu deplasați rolatorul cu o persoană așezată.

Asamblare în 5 pași

Urmați ordinea și verificați stabilitatea înainte de utilizare.

1

Deschideți cadrul



Apăsați mecanismul de pliere și extindeți complet cadrul A.

2

Introduceți mânerele



Introduceți cele două mâner B în tuburile cadrului, cu frânele orientate spre interior.

3

Reglați înălțimea



Setați ambele mâner B la aceeași înălțime și strângeți butoanele.

4

Verificați cadrul



Coborâți scaunul și confirmați că mecanismul de pliere este complet deschis și stabil.

5

Montați coșul și spătarul



Așezați coșul D pe suportul cadrului, apoi introduceți spătarul C în cele două locașuri până se fixează.



Folosirea frânelor

Strângeți manetele pentru a încetini sau opri.

Apăsați manetele în jos pentru a bloca roțile din spate.

Curățați cadrul și scaunul cu o lavetă umedă; verificați periodic frânele și fixările.