

Componente și verificare

Identificați elementele A-D înainte de montaj.



Scaun rulant manual JL973-61

Cadru pliabil ranforsat, cotiere detașabile și suporturi pentru picioare cu plăci metalice.

- Cadru pliabil
- Cotiere detașabile
- Max. 140 kg

Verificați toate blocările înainte de utilizare.

Elemente livrate pentru montaj

A

Cadru pliabil

1 buc.

B

Cotiere detașabile

2 buc.

C

Curea pentru gambe

1 buc.

D

Șuruburi de blocare

2 buc. preinstalate

Șuruburile D sunt montate pe suporturi; nu le îndepărtați complet.

Înainte de utilizare

- Deschideți complet cadrul și apăsați șezutul până la poziția stabilă.
- Verificați strângerea șuruburilor, stabilitatea cadrului și starea roților.
- Testați ambele frâne înainte ca utilizatorul să se așeze.

Curățare și întreținere

- Curățați și dezinfectați periodic cadrul, tapiteria și zonele de contact.
- Lubrifiați moderat piesele rotative și ștergeți imediat surplusul.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat.

IMPORTANT

Blocați ambele frâne înainte de transfer. Nu stați în picioare pe plăcile pentru picioare și nu depășiți sarcina maximă de 140 kg.

Montaj în 4 pași

Folosiți literele A-D din lista de pe pagina 1.

1

Deschideți cadrul A



Trageți lateralele în sens opus, apoi apăsați marginile șezutului până când cadrul este complet deschis.

2

Fixați cureaua C



Prindeți cureaua pentru gambe între cele două suporturi, fără răsucire, la înălțimea indicată.

3

Montați cotierele B



Introduceți fiecare cotieră în locaș și apăsați până când butonul de blocare iese complet prin orificiu.

4

Blocați suporturile D



Strângeți șuruburile preinstalate ale suporturilor pentru picioare și confirmați poziția plăcilor.

VERIFICARE FINALĂ

Cotierele trebuie să fie blocate, iar cureaua să susțină gambele fără presiune.

Testați frânele și stabilitatea pe o suprafață plană. Pentru detașarea unei cotiere, apăsați butonul de blocare și trageți cotiera vertical în sus.

Nu utilizați produsul dacă o fixare este incompletă sau o componentă este deteriorată.