

Manual de utilizare

Desingul, proiectarea și calitatea asigură un maximum de confort, siguranță în utilizare și fiabilitate. Gama de cărucioare poate fi folosită atât în interior cât și în exterior, procesul de producție fiind realizat în China. Acest manual de utilizare conține mici sugestii pentru utilizarea corectă a scaunului cu roțile alese de dumneavoastră și sfaturi pentru siguranța dumneavoastră.

Vă rugăm să citiți întreg manualul cu atenție înainte de a utiliza scaunul cu roțile și să țineți cont de recomandările făcute. Cărucioarele sunt testate și certificate pentru o utilizare normală și corectă, pe pacienți cu o greutate de până la 100 kg. Partile componente ale unui scaun:



Deschiderea cărucioarului

Pentru modelele la care spatarul este pliabil ridicati manerele prin tragere in sus pana ce se ajunge in pozitia corecta (fig1). Verificati ca spatarul sa ajunga in pozitie perfect verticala. Țineți de cotiere și ușor tragand in lateral desfaceți scaunul (fig 2). Apăsați șezutul scaunului cu degetele poziționate spre interior (fig.3) pana la deschiderea completa.



(fig1)



(fig2)



(fig3)

Scoaterea / montarea suportului de picioare

La modelele care au suportul de picioare detasabil pentru a scoate pedalele, trageți de maneta de pe suport spre interior pentru eliberarea pârghiei, glisați structura pe exterior și ridicați suportul de pe cele doua cuie metalice de sustinere. Pentru montarea pedalelor, executati aceeași procedură în sens invers. Apasati usor pe pedala pana in poziția orizontală ca in fig4.

Nu presați suportul de picioare la urcarea și coborârea din cărucior!!



(fig4)

Închiderea (plierea) căruciorului

Așezați suportul de picioare în poziția verticală (fig.5), ridicați scaunul cu ambele mâini prin tragere usoară în sus (fig.6) până la plierea totală a scaunului, dacă mai este nevoie apropiați prin apăsare cele două manere (fig.7). Pentru modelele la care spatarul este pliabil apăsați pe maneta astfel încât spatarul să se poată plia ca în figura (fig.8).



(fig.5)



(fig.6)



(fig.7)



(fig.8)

Avertizari

ATENȚIE la poziția degetelor atunci când pliați scaunul, nu introduceți degetele în diferite găuri. Există pericol de ranire.



Pentru a evita răsturnarea la ridicare, vă rugăm să nu vă sprijiniți pe pedala suportului de picioare.

Nu presați suportul de picioare la urcarea și coborârea din cărucior!!



ATENȚIE: folosiți scaunul numai dacă fizic sunteți capabil și cu precauție nu vă sprijiniți de piesele detașabile, preferabil doar de cadrul caruciorului pentru a evita rasturnarea. Vă rugăm să acționați frânele la roțile mari din spate și să ridicați suportul de picior când doriți să vă așezați/coborâți din și în scaun.

Urcarea în scaun

Aduceți scaunul rulant cât mai aproape de dumneavoastră. Blocați frânele roților din spate, recomandabil ar fi să aveți grijă la brațe. Sprijinindu-vă de cadru împingeți-vă în sus din brațe, apoi coborâți încet pe scaun.

Coborârea din scaun

Opriti cât mai aproape posibil cu partea laterală lângă un alt scaun sau pat. Blocați frânele roților din spate, pentru a reduce la minim riscul de cadere la coborârea din scaunul cu roțile, este recomandat să scoateți brațul de pe partea unde se efectuează aceste operațiuni.

Recomandări în legătură cu urcatul sau coborârea pe scări

ATENȚIE: Acest lucru se va realiza doar de către utilizatorii cu experiență în manuirea carucioarelor. În toate cazurile, se recomandă supravegherea unui asistent!

URCARE: Poziționați scaunul la marginea bordurii pe care doriți să urcați, balansați caruciorul pe roțile din spate în scopul de a ridica roțile din față până pe bordura. Înclinați trunchiul înainte și împingeți puternic spre înainte roțile din spate. Împingeți în continuare până când roțile din spate sunt urcate în totalitate pe obstacol.

COBORÂRE Pentru a coborî repetați procedura în sens invers. Poziționați caruciorul cu partea din spate a scaunului în fața trotuarului, obstacolului, țineți ferm cu mână roțile din spate, apoi coborâți lent. Echilibrați scaunul cu roțile astfel încât roțile din față să ajungă jos.

ATENȚIE: Se recomandă să nu utilizați această tehnică, în cazul unei pante mai mari de 10 cm.

Cotierele pot fi pliabile sau detașabile. Rabatarea cotierei este de folos când doriți să coborâți sau urcați în scaun. La unele modele pentru a rabata cotiera este suficient să apăsați maneta de eliberare / buton și să rotiți spre spate bratul de sprijin.

Modelele de carucior cu roți mari pe spate de 60 cm sunt utilizate pentru deplasare fără ajutor împingeți în direcția dorită, antrenând manual cadrul de pe roata.

Modelele cu roți spate mici de 30 cm sunt destinate pentru conducerea scaunului rulant cu ajutorul unui operator prin mânerul din spate. Acest tip de roată este utilizat numai pentru a permite o deplasare a scaunului rulant în locuri foarte înguste (de exemplu, ușile unui ascensor).

Curățarea și Dezinfectarea

Curățarea tapițeriei și căptușeala se realizează folosind o soluție de apă și săpun, acestea sunt realizate din Nylon. Nu țineți scaunul direct în soare, sau în ploaie. Este strict interzis să faceți duș în acest scaun. Dacă scaunul intră în contact cu apa, uscați bine și ungeți cu ulei acolo unde este necesar.

Curățarea pieselor de cadru și metal puteți folosi soluție de apă și săpun, după care uscați cu o cârpă moale pentru a nu zgâria vopseaua cadrului.

Curățarea de roți și frâne În mod similar roțile pot fi curățate cu apă și săpun. Acordați o atenție deosebită la uscare: este foarte periculos utilizarea scaunului cu roțile încă umede! Verificați presiunea aerului în anvelope și gradul de uzură al acestora. Umflați dacă este necesar, sau înlocuiți. Spițele trebuie verificate cel puțin o dată pe an. Trebuie să curățați periodic roțile pentru a elimina mizeriile prinse la roți.

Dezinfectare Atenție: Nu utilizați niciodată acizi, soluții alcaline sau solvenți cum ar fi acetona sau diluant. Pentru a utiliza scaunul în condiții de siguranță, ar trebui să verificați des frânele, să verificați vizual dacă spătarul/sezutul este în stare bună și nu prezintă rupturi.

Condiții de acordare a garanției

Toate fotoliile Dr.Happy sunt garantate împotriva defectelor de material pentru o perioadă de doi (2) ani de la data de vânzare a produsului, sub rezerva limitelor și excepțiilor specificate mai jos. Această garanție nu se aplică în cazul unei utilizări incorecte, abuz sau modificarea produsului și incapacitatea de a urma instrucțiunile de utilizare.

Utilizarea corectă prevăzută a produsului este indicată în acest manual. AxaBio Medical nu este responsabilă pentru orice daune, accidente sau orice altceva cauzate sau legate de instalarea și/sau utilizarea echipamentelor neconforme, sau nerespectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualele de instalare, asamblare și utilizare.

AxaBio Medical nu garantează produsele împotriva daunelor sau defecte în următoarele condiții: dezastruri naturale, întreținerea sau repararea de către neautorizați, utilizarea de părți sau componente care nu sunt originale, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, modificări neautorizate, daune de transport. Garanția nu acoperă părțile consumabile cauciucuri, camere, etc.

Reparații și garanții

O reparație nu reînnoiește sau extinde garanția. Costurile de reparație și de livrare care nu sunt acoperite de garanție vor fi suportate integral de către client. Piese originale de schimb sunt garantate timp de 6 (șase) luni de la data primirii.