
Instrucțiuni scaun tip comoda cu vas toaleata JL894

Felicitări pentru achiziționarea scaunului cu vas de toaletă! Acest manual vă va ghida pas cu pas în procesul de instalare și utilizare a acestui dispozitiv. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a vă asigura că utilizați corect produsul și pentru a evita orice problemă potențială.

Descriere:

Număr model: JL894



Metoda de instalare și utilizare

1. Scoateți din Ambalaj și Deschideți Scaunul:

- Scoateți scaunul din ambalaj și deschideți-l conform instrucțiunilor ilustrate în FOTO 1 și 2.
- Rotiți cadrul cotierei din față pentru a deschide și apoi rotiți cadrul din spatele cotierei, făcând cadrele de cotieră într-un singur nivel.
- Ridicați tubul transversal și asigurați-vă că forma U a acestuia se introduce în cadrul scaunului.

2. Puneți Galeata și Plăcile în Scaun:

- Așezați galeata în interiorul scaunului și asigurați-vă că forma plăcii scaunului și a plăcii de acoperire se introduc corect în cadrul scaunului, conform FOTO 3.

3. Reglare înălțime tub picior:

- Asigurați-vă că tubul piciorului este reglabil la aceeași înălțime la toate cele 4 picioare, înainte de utilizare.

4. Capacitate Maximă de Încărcare:

- Capacitatea maximă de încărcare a scaunului este de 100 kg. Utilizatorii nu au voie să depășească această capacitate maximă de încărcare.



FOTO 1



FOTO 2

Prima utilizare :

- La prima utilizare a scaunului , este recomandat ca utilizatorii să fie îndrumați cu privire la modul corect de utilizare.
- Asigurați-vă că picioarele sunt fixate la aceeași înălțime. Este important să existe o suprafață plană pentru utilizare.

Depozitare:

- Pentru a depozita sau a muta scaunul, scoateți colacul, capacul și găleata. Lăsați tubul transversal în jos, apoi întoarceți cadrele cotierelor, unul în lateral și unul în spate, conform ilustrațiilor 3 și 4.

Cleme în
forma de U
pentru fixare



FOTO 3



FOTO 4

Avertismente și Precauții:

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare a scaunului – 100 kg
- Asigurați-vă că instalarea și utilizarea sunt conforme cu normele locale și cu recomandările producătorului.
- În cazul unor probleme sau întrebări, nu ezitați să contactați serviciul clienți al producătorului.

Încheiere:

Acest manual de utilizare vă oferă informațiile de bază necesare pentru a instala și folosi corect scaunul cu vas de toaletă. Pentru detalii suplimentare sau pentru întrebări, consultați manualul specific al produsului sau contactați serviciul clienți al producătorului. Vă dorim o experiență plăcută și utilă cu noul dumneavoastră scaun cu vas de toaletă!