
Instrucțiuni pentru scaunul de toaletă JL897

Scopul dispozitivului

Scopul scaunului de toaletă este să ajute oamenii să facă toaletă, să-i facă singuri pe cei care au nevoie.

Descrieri: Scaun de toaletă din oțel

Model nr.: JL897



Punctul nr.	JL897
Înălțime totală	47cm
Lungimea totală	40 cm
Lățimea scaunului	38 cm
Adâncimea scaunului	40 cm
Înălțimea scaunului	47 cm
Limită de greutate.	100kg

Transport

Poate fi transportat cu mașina și alte mijloace de transport public.

Metoda de instalare și utilizare

1. Scoateți toaleta din carton, vă rugăm să consultați Ilustrația (1)
2. Deschideți brățea, vă rugăm să consultați Ilustrația (2)
3. Fixează suportul cu cuiul de blocare, assemblează găleata în scaun
Vă rugăm să consultați ilustrațiile (3), (4), (5)



Ilustrația 1 Ilustrația 2



Ilustrația 3 Ilustrația 4 Ilustrația 5

Instruire

Când folosești prima dată scaunul de toaletă, te rugăm să te asiguri că există cineva care să ajute utilizatorul să înțeleagă cum să folosească toaleta. Vă rog să folosiți toaleta de pe locul plat.

Eliminarea

Deblochează pinul și pliază orteza. Vă rugăm să consultați ilustrațiile (6), (7) și (8)



Ilustrație6



Ilustrația 7



Ilustrația 8

Depozitare

Depozitarea scaunului de toaletă într-un mediu uscat și ventilat,
Temperatura de depozitare de aproximativ 5°C până la 55°C

Întreținere

- a. Verifică strângerea șuruburilor și a blocării arcului, stabilizarea mersului înainte de utilizare.
- b. Curățarea regulată va preveni praful tuburilor sau să se desprindă și va îmbunătăți funcționarea lină a scaunului tău de toaletă.

ATENȚIE

TOATE avertismentele și precauțiile din acest manual trebuie respectate.
NU încercați să urcați sau să coborâți o pantă cu un film de apă, gheață sau ulei.
NU sta pe cadrul scaunului de toaletă.
