


## **Baston Ortopedic, din Aluminiu Dr. Happy JL920, JL930, JL927 JL921 JL924, JL926**

Bastonul ortopedic din aluminiu este reglabil în înălțime funcție de statura utilizatorului. Corpul bastonului poate fi dintr-o bucată sau poate fi pliabil în 3 sau 4 segmente pentru a fi transportat în geantă. Mânerul poate fi din polipropilena, lemn, polipropilena acoperită cu elastomeri, lemn acoperit cu elastomeri, etc Forma mânerului permite utilizarea cu orice mână, sau poate fi anatomica pentru utilizare pe mâna dreaptă sau mâna stângă

### **Reglajul în înălțime**

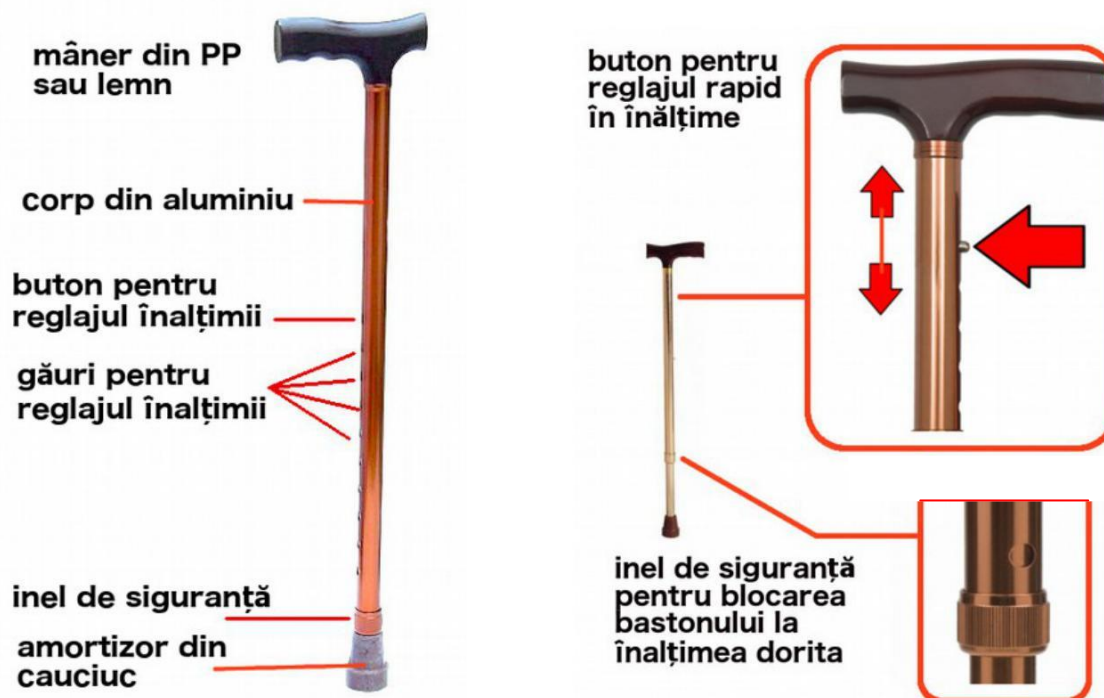

Deșurubați inelul de siguranță 2-3 ture. Apăsăți butonul de reglaj și trageți de partea inferioară a bastonului, cea cu amortizorul de cauciuc până când butonul de reglaj ajunge în orificiul de blocaj următor. În acest mod înălțimea (lungimea) bastonului ortopedic crește cu aproximativ 2,5 cm. Repetați operația până când ajungeți la înălțimea dorită. Dacă doriți să reduceți înălțimea bastonului apăsați de partea inferioară a acestuia, cea cu amortizorul de cauciuc până când butonul de reglaj ajunge în orificiul de blocare următor. Repetați operația până când se ajunge la înălțimea dorită.

### **După reglajul înălțimii strângeți inelul de siguranță.**

Înălțimea optimă a bastonului se obține astfel:

Utilizatorul în poziție verticală și mâna pe lângă corp, bastonul lângă picior, amortizorul de cauciuc pe pardoseala, mânerul bastonului trebuie să fie în dreptul încheieturii mâinii utilizatorului.

***Nu depășiți greutatea maxim admisă a utilizatorului conform indicației fabricantului!***

***In funcție de modelul ales bastonul poate avea 2, 3 sau 4 picioare pentru a oferi clientului o susținere cât mai eficientă!***

**Nota:** Pentru utilizarea corectă a dispozitivele medicale destinate persoanelor cu dizabilități locomotorii, în vederea recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice cereți sfatul medicului ortoped sau a kineto-terapeutului.

Dispozitivul medical BASTON ORTOPEDIC face parte din clasa dispozitivelor de mers, este destinat persoanelor cu dizabilități locomotorii, pentru a le facilita deplasarea.

Dispozitivul medical BASTON ORTOPEDIC, confecționat din aluminiu, este ușor de utilizat, se poate regla în funcție de dimensiunea anatomică a utilizatorului.

După utilizarea bastonului o perioadă lungă de timp, amortizorul de cauciuc se poate uza. Se recomandă verificarea periodică a gradului de uzură a acestui tampon de cauciuc în vederea înlocuirii cu unul nou.

Nu se recomandă utilizare bastonului cu amortizorul uzat sau lipsa, acest aspect conducând la pierderea aderenței, instabilitate

### **Mod de utilizare**

Bastonul se ține în mână opusă piciorului cu probleme, de exemplu dacă aveți o suferință la piciorul stâng, bastonul se va ține în mână dreaptă. Se pășește simultan cu piciorul bolnav și bastonul, în acest mod greutatea corpului apasă pe baston și pe piciorul bolnav reducând presiunea pe picior.

### **Mod de Întreținere**

Se curăță cu o cârpă moale și umedă, după care se șterge cu o cârpă uscată. Nu folosiți detergenți sau alte substanțe chimice pentru curățare. Nu folosiți materiale abrazive. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului și al protecției materialului din care este confecționat bastonul.