

Manual de instrucțiuni JL975-



A. Instalare și ajustare.

1. Deschide cadrul scaunului cu roțile. Așa cum se vede în imaginea 1.
2. Asamblează centura pentru picioare, așa cum se vede în poza 2.



Poza 1



Poza 2

3. Montează cotierele ambelor părți și asigură-te că butonul iese din gaură pentru a fixa armrest.as poza 3.

Cotiera este cotiera detașabilă. Apasă butonul și trage cotiera în sus pentru a-l scoate, așa cum se vede în imaginea 4.



Poza 3



Poza 4

4. Montează suportul pentru picioare, rotește sprijinul până când catarama arcului se blochează, ca în poza 5



B. Siguranță și întreținere:

1. Verificați strângerea șuruburilor și stabilizarea cadrului scaunului cu roțile înainte de utilizare.
2. Adaugă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifianț în piesele rotative.
3. Fă curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Așezat într-un mediu uscat și ventilat.
4. Do nu depășește capacitatea maximă de greutate de 136 kg.