


JL933A Carja cu patru puncta de sprijin

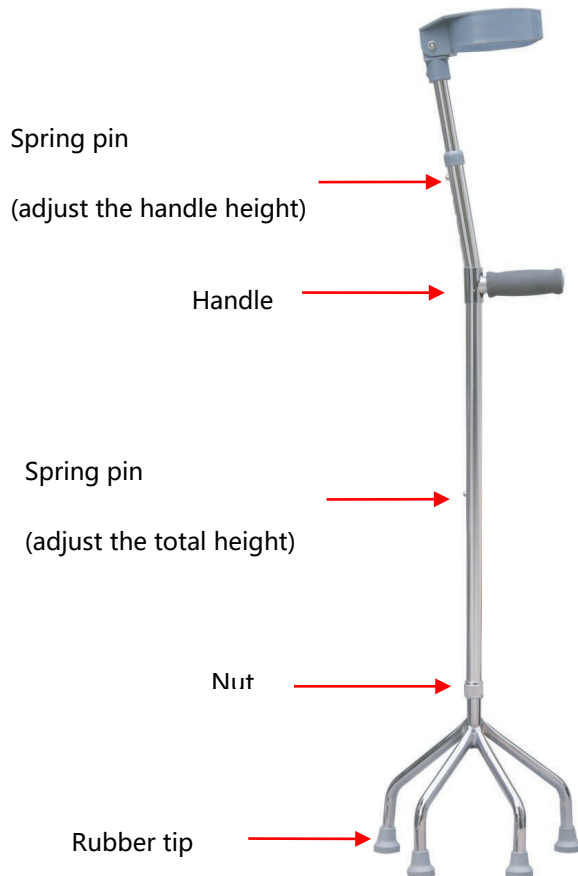

Atenționări:

1. Înainte de utilizare, verificați stabilitatea cadrului și a capetelor din cauciuc.
Utilizatorul nu trebuie să depășească greutatea maximă admisă (100 kg).
2. Slăbiți piulița, apoi ajustați poziția bolțului cu arc la înălțimea corespunzătoare și strângeți piulița pentru utilizare. Atunci când bolțul cu arc este blocat corect, veți auzi un sunet de tip „clic” .
3. Atunci când capătul din cauciuc este deteriorat, înlocuiți-l imediat cu unul nou.
4. Curățați regulat produsul, dezinfecțați periodic și păstrați-l într-un mediu uscat