

Componente și verificare

Identificați piesele A-F înainte de a începe montajul.



Scaun de toaletă reglabil JLC00601

Colac din PU, recipient detașabil și cutie laterală

● Spătar cu mâner

● Cotiere detașabile

● Picioare reglabile

Lista pieselor A-F

A



Scaun principal

1 buc.

B



Spătar cu mâner

1 buc.

C



Cotieră detașabilă

2 buc.

D



Cutie laterală

1 buc.

E



Recipient cu capac

1 buc.

F



Tub reglabil pentru
picioar

4 buc.

Reglarea înălțimii

1

Apăsați butonul metalic de pe fiecare tub F.

2

Glisați tubul până la înălțimea dorită și lăsați butonul să iasă complet prin orificiu.

3

Setați toate cele patru picioare la aceeași înălțime.

IMPORTANT

Nu utilizați produsul dacă un picior nu este blocat sau dacă o componentă este deteriorată.

Înainte de utilizare

- Așezați produsul pe o suprafață plană și stabilă.
- Verificați spătarul, cotierele și cele patru picioare.
- Capacul și colacul trebuie să fie corect poziționate.

Utilizare sigură


- Nu vă urcați în picioare pe produs.
- Așezați-vă controlat și evitați mișcările bruște.
- Supravegheați persoanele care necesită asistență.

Asamblare în 4 pași

Folosiți literele din lista de pe pagina 1 pentru identificarea pieselor.

1

Montați picioarele

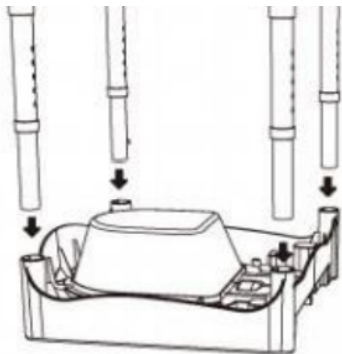

Întoarceți scaunul A și introduceți cele patru tuburi F în locașurile lor.

2

Montați spătarul



Aliniați spătarul B cu orificiile din spate și apăsați ferm până se fixează.

3

Montați cotierele



Introduceți cotierele C în locașurile laterale și apăsați în jos până se fixează.

4

Montați accesoriile



Ridicați capacul și colacul, introduceți recipientul E, apoi fixați cutia laterală D.

IMPORTANT

Verificați stabilitatea și fixarea tuturor componentelor înainte de prima utilizare.

Curățare

- Scoateți și goliți recipientul după utilizare.
- Spălați, clătiți și uscați complet componentele.

Întreținere

- Ștergeți cadrul și colacul cu o lavetă moale.
- Păstrați produsul curat, uscat și ferit de deteriorări.