

Componente și verificare

Identificați piesele A-F și seturile de fixare înainte de montaj.



Scaun de toaletă reglabil JL810

Cadru metalic cu cotiere, picioare reglabile și ansamblu sanitar detașabil.

- Înălțime reglabilă
- Șezut 45 x 40 cm
- Max. 100 kg

Folosiți toate șaibele și strângeți fixările uniform.

Lista pieselor A-F

A



Cadre laterale cu cotiere

2 buc.

B



Cadru de susținere

1 buc.

C



Suport pentru spătar

1 buc.

D



Șuruburi, șaibe și piulițe

6 seturi

E



Găleată cu capac

1 buc.

F



Colac și capac

1 set

Dimensiuni esențiale

LUNGIME TOTALĂ

55 cm

ÎNĂLȚIME TOTALĂ

58-68 cm

ȘEZUT

45 x 40 cm

ÎNĂLȚIME ȘEZUT

41-51 cm

ÎNĂLȚIME SPĂTAR

33 cm

SARCINĂ MAXIMĂ

100 kg

Înainte de montaj

- Verificați piesele, cantitățile și integritatea cadrului.
- Montați produsul pe o suprafață plană și curată.
- Nu utilizați componente deformatate sau deteriorate.

Reglare și igienă

- Reglați toate cele patru picioare la aceeași înălțime.
- Scoateți găleata și capacul pentru curățare separată.
- Uscați complet înainte de remontare și depozitare.

IMPORTANT

Verificați stabilitatea și nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.

Montaj în 4 pași

Folosiți literele A-F din lista de pe pagina 1.

1

Îmbinați cadrele A și B



Orientați găurile cadrelor laterale spre interior. Fixați fiecare latură cu elementele D.

2

Montați suportul C



Fixați suportul spătarului cu D și așezați câte o șaibă pe ambele părți ale țevii.

3

Instalați E și F



Așezați găleata pe suport, apoi montați colacul și capacul în punctele de prindere.

4

Reglați picioarele



Apăsați butonul fiecărui picior și selectați aceeași gaură pentru toate cele patru picioare.

VERIFICARE FINALĂ

Strângeți toate piulițele și confirmați că fiecare buton de reglaj este blocat.

Așezați produsul pe o suprafață plană și apăsați ușor pe fiecare cotieră pentru a verifica stabilitatea. Găleata, colacul și capacul trebuie să rămână corect poziționate.

Nu utilizați produsul dacă există joc, înclinare sau o fixare incompletă.