

Montaj în 4 pași

Verificați piesele, apoi urmați pașii în ordinea indicată.



Scaun cu toaletă JL895L

Cadru din aluminiu | Reglare în 5 trepte

100 kg

SARCINĂ MAX.

40 x 43 cm

ȘEZUT

40-50 cm

ÎNĂLȚIME ȘEZUT

50 cm

LĂȚIME TOTALĂ

PIESE

A Șurub M6 x 55 (12)

B Șaibă arcuită (12)

C Piuliță M6 (12)

D Șurub M5 x 30 (4)

E1 Colac (1)

E2 Capac tapițat (1)


F Recipient (1)

Asamblare

1

Conectați cadrele

A+B+C

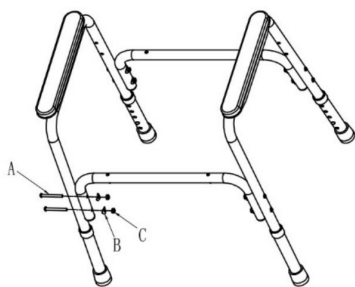


Uniți cadrele laterale cu elementele transversale. Fixați cu A, B și C.

2

Montați spătarul

A+B+C

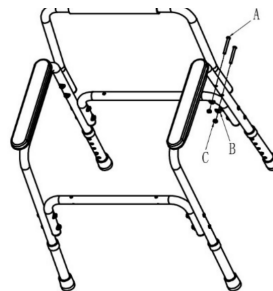


Poziționați spătarul între cadre și strângeți uniform piesele A, B și C.

3

Fixați colacul

D+E1

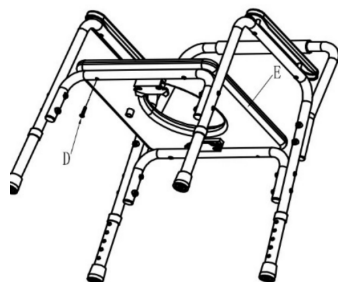


Așezați colacul E1 pe suport și fixați-l dedesubt cu cele 4 șuruburi D.

4

Finalizați montajul

E2+F

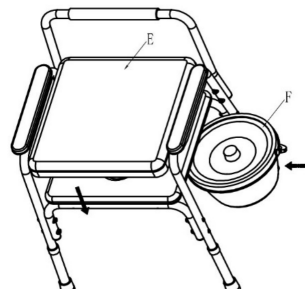


Așezați capacul E2 și glisați recipientul F complet pe ghidaje.

Reglare, utilizare și siguranță

Efectuați controlul de stabilitate înainte de fiecare utilizare.

Reglarea înălțimii

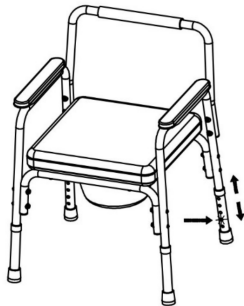

- 1 Apăsați știftul cu arc.
- 2 Glisați piciorul la orificiul dorit.
- 3 Eliberați și verificați blocarea completă.

IMPORTANT

Toate cele 4 picioare trebuie setate la aceeași treaptă.

5 trepte | 40-50 cm

Utilizare

1

Pregătire

Pardoseală plană și uscată; toate blocajele active.

2

Configurare

Scoateți E2 și capacul recipientului; confirmați poziția F.

3

După utilizare

Extrageți F lateral, goliți, spălați și uscați.

Siguranță

- Nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.
- Folosiți scaunul numai pe o suprafață plană, stabilă și uscată.
- Nu utilizați produsul dacă se clatină sau are piese slăbite, lipsă ori deteriorate.
- Nu vă ridicați în picioare pe scaun și nu îl folosiți pentru transport.
- Solicitați ajutor la transfer dacă utilizatorul nu se poate așeza sau ridica în siguranță.

Specificații

Șezut	40 x 43 cm
Înălțime totală	71-81 cm
Înălțime șezut	40-50 cm
Lățime totală	50 cm
Sarcină maximă	100 kg

Curățare și control

- Spălați recipientul cu apă caldă și detergent neutru; uscați complet.
- Ștergeți cadrul și tapițeria cu o lavetă moale; evitați abrazivii și solvenții.
- Verificați periodic știfturile, vârfurile din cauciuc și elementele de fixare.