

Componente și verificare

Identificați elementele livrate separat înainte de montaj.



Scaun rulant manual JL901

Cadru pliabil, cotiere și suporturi pentru picioare detașabile, pentru deplasarea asistată sau autonomă.

- Cadru pliabil
- Roți spate 24 inch
- Max. 100 kg

Montajul suporturilor nu necesită unelte.

Elemente livrate pentru montaj

A

Cadru pliabil

1 buc.

B

Suporturi pentru picioare

2 buc.

C

Curea pentru gambe

1 buc.

Așezați cele trei elemente pe o suprafață curată și verificați să nu fie deteriorate.

Înainte de utilizare

- Deschideți complet cadrul și apăsați șezutul până la poziția stabilă.
- Verificați strângerea șuruburilor, roțile și funcționarea ambelor frâne.
- Confirmați blocarea suporturilor și poziționarea curelei pentru gambe.

Curățare și întreținere

- Curățați și dezinfectați periodic cadrul, tapiteria și zonele de contact.
- Lubrifiați moderat piesele rotative și ștergeți imediat surplusul.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat.

IMPORTANT

Blocați ambele frâne înainte de transfer. Nu stați în picioare pe suporturile pentru picioare și nu depășiți sarcina maximă de 100 kg.

Montaj în 4 pași

Folosiiți literele A-C din lista de pe pagina 1.

1

Deschideți cadrul A



Trageți lateralele în sens opus, apoi apăsați marginile șezutului până când cadrul este complet deschis.

2

Pregătiți suporturile B



Desfaceți suporturile pentru picioare și coborâți plăcile în poziția indicată de schiță.

3

Montați suporturile B



Așezați fiecare suport pe bolțurile hexagonale ale cadrului și rotiți-l spre interior până se blochează.

4

Fixați cureaua C



Prindeți cureaua între cele două suporturi, fără răsucire, apoi verificați poziția ambelor plăci.

VERIFICARE FINALĂ

Suporturile trebuie să fie blocate, iar cureaua să susțină gambele fără presiune.

Testați frânele și stabilitatea pe o suprafață plană. Pentru pliere, ridicați plăcile pentru picioare și trageți șezutul în sus; nu forțați articulațiile.

Nu utilizați produsul dacă o fixare este incompletă sau o componentă este deteriorată.