

Componente și verificare

Montaj simplu, fără unelte: identificați elementele livrate separat.



Scaun rulant pliabil JL958LAQ

Cadru pliabil, spătar rabatabil, cotiere reglabile și roți spate cu eliberare rapidă.

● Reglaje fără unelte

● Suporturi detașabile

● Cadru compact

Elemente livrate pentru montaj

A



Scaun pliabil

1 buc.

B



Suporturi pentru
picioare

2 buc.

C



Curea pentru gambe

1 buc.

Funcții principale

Reglaje

- Rabatați spătarul folosind butoanele de lângă mânere.
- Reglați înălțimea coterelor și verificați blocarea.
- Ridicați plăcile pentru picioare înainte de transfer.

Mobilitate

- Folosiți cercurile de antrenare pentru deplasare manuală.
- Aplicați ambele frâne înainte ca utilizatorul să se așeze.
- Demontați roțile spate numai când scaunul este gol.

IMPORTANT

După montaj, verificați blocarea suporturilor, a curelei și a roților spate.

Înainte de utilizare

- Verificați cadrul, îmbinările și stabilitatea scaunului.
- Testați frânele și roțile înainte de fiecare deplasare.
- Nu efectuați reglaje în timpul transferului utilizatorului.
- Solicitați ajutor dacă transferul nu poate fi realizat sigur.

Întreținere

- Verificați periodic strângerea șuruburilor și fixărilor.
- Lubrifiați moderat piesele rotative; ștergeți surplusul.
- Curățați și dezinfectați produsul în mod regulat.
- Depozitați într-un spațiu uscat și bine ventilat.

Montaj și reglaje

Urmați pașii în ordine și confirmați blocarea fiecărui mecanism.

1

Deschideți cadrul



Așezați scaunul pe o suprafață plană și deschideți complet cadrul și șezutul.

2

Montați suporturile și cureaua



Introduceți suporturile lateral, rotiți-le spre interior până la blocare și fixați cureaua pentru gambe.

3

Reglați cotierele



Apăsăți butonul, glisați cotiera la înălțimea dorită și confirmați blocarea.

4

Folosiți eliberarea rapidă



Cu scaunul gol și stabil, apăsați capătul axului pentru a scoate roata; verificați blocarea după remontare.

CONTROL FINAL

Suporturile, cotierele și roțile trebuie să rămână ferm blocate, fără joc excesiv.

Acționați ambele frâne și verificați stabilitatea scaunului înainte de transfer. Nu utilizați produsul dacă o componentă nu se blochează complet.

Nu demontați roțile și nu rabatați spătarul cât timp scaunul este ocupat.