

Componente și verificare

Identificați piesele A-K înainte de a începe montajul.



Scaun cu toaletă mobil JL693

Șezut tapițat, recipient detașabil și cadru pe roți

● Cadru metalic

● Șezut tapițat

● Recipient detașabil

Lista pieselor A-K

A



Șurub

M8 x 45 | 4 buc.

B



Șaibă elastică

Ø8 | 4 buc.

C



Inel plastic arcuit

Cantitate: 4 buc.

D



Șurub

M6 x 48 | 4 buc.

E



Șaibă plată

Ø6 | 6 buc.

F



Piuliță

M6 | 6 buc.

G



Șurub

M6 x 35 | 2 buc.

H



Șurub

M5 x 35 | 4 buc.


I



Placă șezut cu deschidere

Cantitate: 1 buc.

J

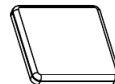

Pernă / șezut tapițat

Cantitate: 1 buc.

K



Recipient cu capac

Cantitate: 1 buc.

A-H: feronerie | I-K: componente

Verificați piesele și cantitățile înainte de montaj.


IMPORTANT

Nu începeți montajul dacă lipsește o piesă sau dacă o componentă este deteriorată.

Asamblare în 4 pași


Folosiți literele din lista de pe pagina 1 pentru identificarea pieselor.

1 Asamblați cadrul

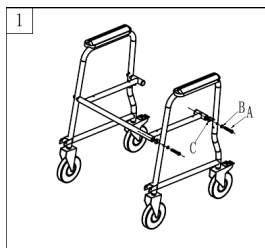


Aliniați secțiunile cadrului și fixați-le pe ambele laterale cu piesele A, B și C.

2 Montați suportul frontal

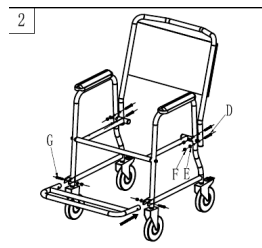

Fixați suportul frontal cu G, apoi securizați îmbinările folosind D, E și F.

3 Fixați șezutul

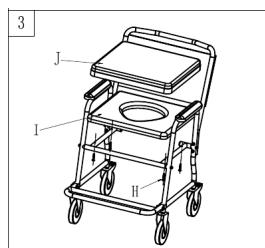

Prindeți placa decupată I cu șuruburile H, apoi așezați perna J deasupra.

4 Introduceți recipientul



Montați recipientul K sub deschiderea șezutului și verificați poziționarea stabilă.

IMPORTANT

Toate elementele de fixare trebuie strânse înainte de utilizare.

Siguranță

- Verificați șuruburile, piulițele și stabilitatea cadrului.
- Blocați roțile înainte de așezare, ridicare sau transfer.
- Nu utilizați produsul dacă este instabil sau deteriorat.

Curățare și întreținere

- Îndepărtați perna și recipientul înainte de curățare.
- Curățați recipientul cu o soluție delicată, apoi clătiți și uscați.
- Ștergeți cadrul și tapițeria; păstrați produsul uscat.