

Componente și verificare

Identificați piesele A-M înainte de a începe montajul.



Scaun mobil pentru duș și toaletă JLC00301

Cadru din aluminiu, șezut detașabil și recipient inclus

- Patru roți cu frână
- Suport pliabil
- Sarcină max. 110 kg

Lista pieselor A-M

A Șurub M6 x 40 mm	F Șurub M6 x 55 mm	J Suport picioare pliabil
B Clemă de fixare plastic	G Șaibă arcuită pentru fixare	K Piuliță pentru suport
C Tub cadru cu roată	H Piuliță cu cap pentru fixare	L Recipient cu capac
D Tub cotieră lateral	I Tub spătar ansamblu superior	M Șezut detașabil
E Suport recipient sub șezut		

Date esențiale

SARCINĂ MAXIMĂ

110 kg

GREUTATE NETĂ

7,6 kg

DIMENSIUNI TOTALE

56,5 x 82 x 92 cm

ÎNĂLȚIME ȘEZUT

51 cm

ȘEZUT

46 x 45 cm

ROȚI

4 inch, cu frână

IMPORTANT

Nu începeți montajul dacă lipsește o piesă sau dacă o componentă este deteriorată.

Înainte de utilizare

- Verificați toate șuruburile și stabilitatea cadrului.
- Blocați toate cele patru roți înainte de a vă așeza.

Utilizare sigură


- Nu depășiți sarcina maximă de 110 kg.
- Introduceți complet recipientul în ghidajul său.

Asamblare în 4 pași

Folosiți literele din lista de pe pagina 1 pentru identificarea pieselor.

1

Asamblați cadrul

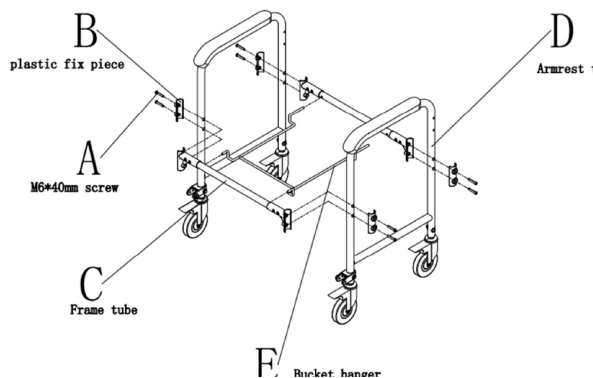

Fixați tuburile C și D cu șuruburile A și clemele B; poziționați suportul E.

2

Montați spătarul


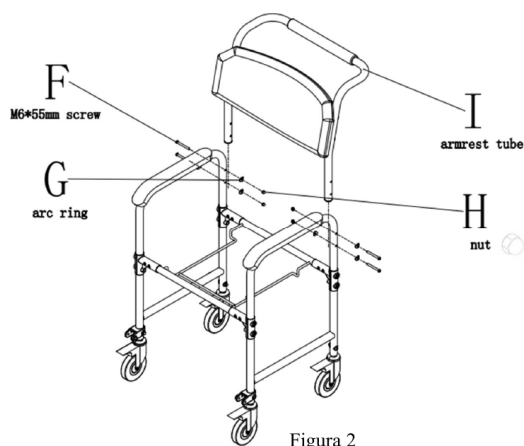


Figura 2

Fixați ansamblul I cu șuruburile F, șaibele G și piulițele H.

3

Fixați suportul pentru picioare

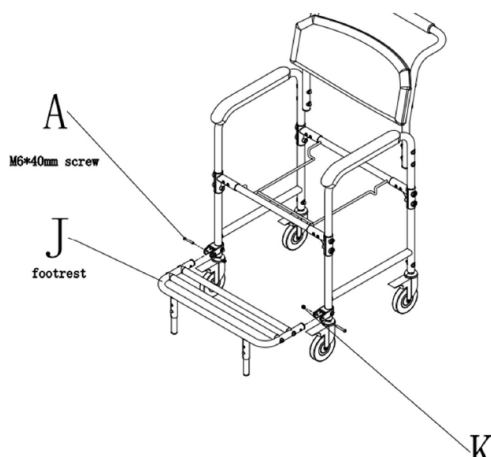

Montați piesa J pe cadru folosind șuruburile A și piulițele K.

4

Montați șezutul și recipientul

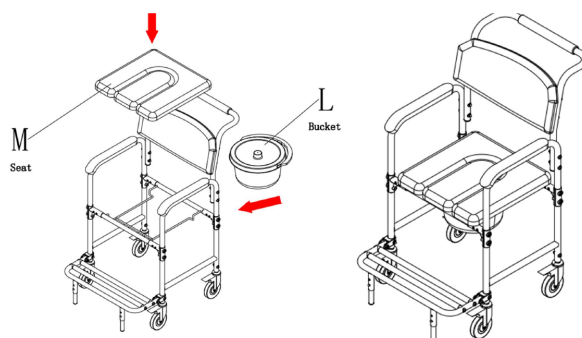


Figura 4

Așezați șezutul M și introduceți recipientul L în ghidajul de sub șezut.

VERIFICARE FINALĂ

Strângeți toate fixările, testați stabilitatea și blocați roțile înainte de utilizare.

Curățați și dezinfectați periodic; păstrați produsul complet uscat, într-un spațiu ventilat.