

JLC00501 Scaun cu toaleta si roti



Detalii produs

- Argintiu mat Structura din aluminiu
- Spătar din plastic albastru
- Mâner din spumă neagră
- Scaun în formă de U cu găleată pătrată
- Suport pentru picioare pliabil
- Măsurători:
- Latime totala: 57 cm
- Inaltime totala: 97cm
- Lungime totala :73 cm
- Inaltime sezut: 48 cm.
- Latime sezut: 44cm
- Adâncime șezut:42cm
- Inaltime spatari :47 cm
- Roțile din spate:4 "cu frână. Roți față: 4" cu frână
- Max. utilizator: 120 kg
- Greutate netă :9 kg



Instrucțiuni de asamblare

1) Scoateți produsul din cutie, ca figura 1



Figura 1

2) Apăsați încet balamaua pentru a extinde cadrul produsului, ca figura 2



Figura 2

3) Introduceți spătarul și asigurați-vă că spătarul a fost complet fixat (asigurați-vă că știftul arcului este fixat) ca figura 3,



Figura 3

4) Asamblați găleata din spate, ca figura 4,



Figura 4

5) Utilizarea frânei: Apăsați frâna a patru roți pentru a bloca produsul, ca în figura 5



Figura 5

6) Mânerul ar putea fi răsturnat ca figura 6



Figura 6

7) Suportul pentru picioare poate fi pliat ca figura 7



Figura 7

Siguranță și întreținere

1. Citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

Verificați etanșeitarea șuruburilor și stabilizarea cadrului produsului înainte de utilizare. Asigurați-vă că scaunul comod este complet extins.

Ambele tuburi de spătar sunt fixe .

2. Înainte de a vă așeza pe scaun, asigurați-vă că cele patru roți sunt blocate.

Asigurați-vă că găleata este introdusă în șina de ghidare sub scaun și că capacul scaunului este îndepărtat. Cupa este ușor detașabilă.

3. Utilizatorii nu trebuie să depășească greutatea maximă de încărcare (100 kg)

4. Faceți unele curățări frecvent și faceți unele dezinfecții periodice. Plasați butonul Produs într-un mediu uscat și ventilat.