


JL609GCU INSTRUIRE

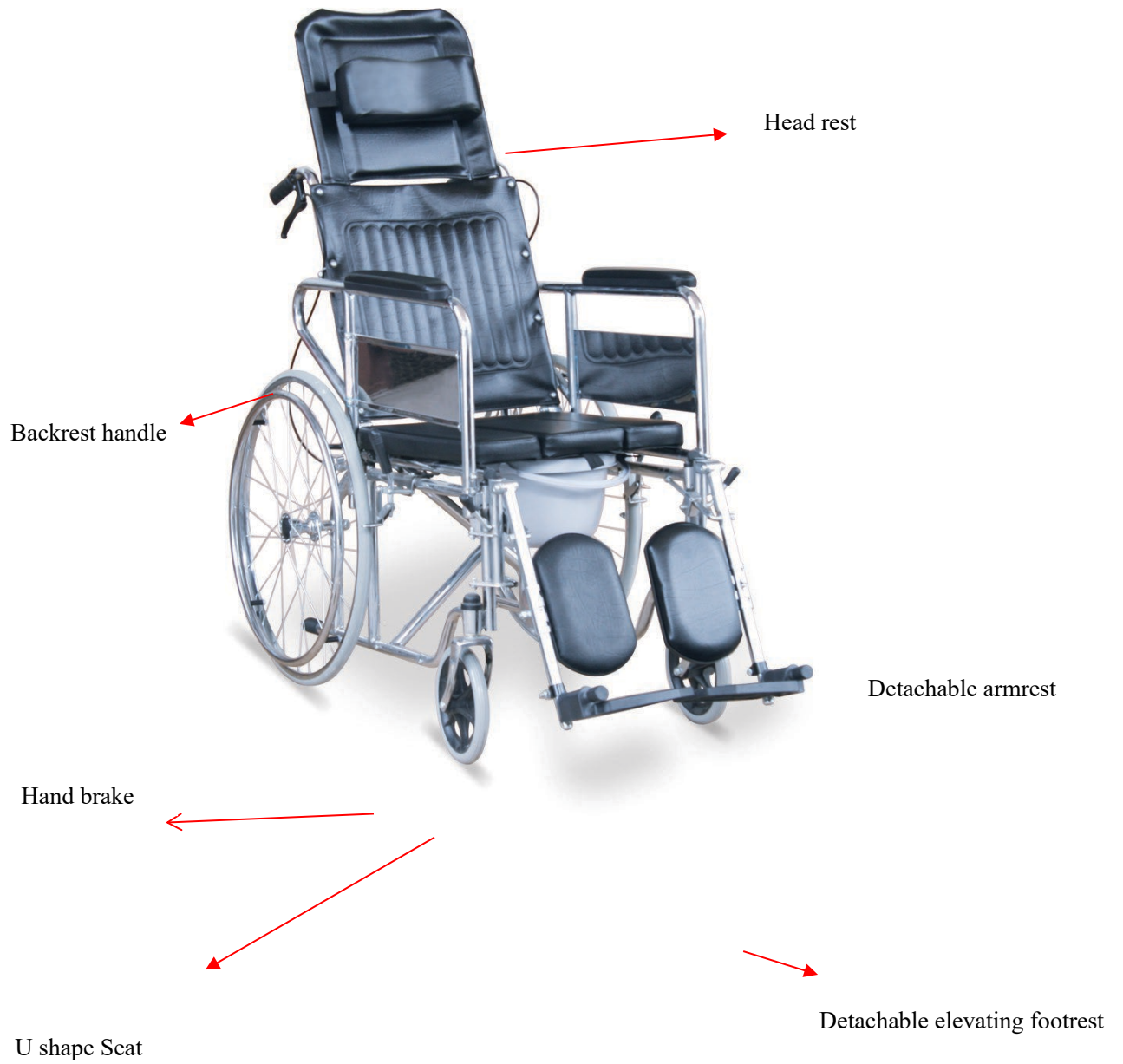

Caracteristică:

Cadru din oțel cromat

Tetieră detașabilă

Cotieră detașabilă

Suportul de picioare ridicabil detașabil

Scaun detașabil în formă de toaletă în formă de U

Cu găleată detașabilă

Spătar reclinabil

A. Adună și ajustează.

1. Scoate produsul din cutie și apoi deschide rama scaunului cu roțile, ca în imaginea 1.



Picture 1



Picture 2

2. Montează suportul pentru picioare, rotește suportul până când catarama arcului este blocată, apoi ajustează mânerul pentru a ajusta suportul la unghiul potrivit, ca în poza 2.

3. Plăcuța și placa tetierei pot fi pliate, ca în imaginea 3.



Picture 3

4. Montează roata anti-ruliu, apoi montează clema C pentru a fixa roata, ca în imaginea 4



Picture 4

5. Montează spătarul, introduce-l până când bila se blochează, ca în poza 5.6.



Picture 5



Picture 6

6. Montarea plăcii de șezut, stabilizarea cataramei pe cadrul scaunului cu roțile, ca în poza 7



Picture 7

7. Montează găleata și pune-o sub placa șezutului, ca în poza 8.9.



Picture 8



Picture 9

B. Siguranță și întreținere

1. Verificați strângerea șuruburilor și stabilizarea cadrului scaunului cu roțile înainte de utilizare.
2. Adaugă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifiant în piesele rotative
3. Fă curățenie frecventă și dezinfectare periodică. Plasează scaunul cu roțile într-un mediu uscat și ventilat.