

Asamblare în 6 pași

Verificați componentele și urmați pașii în ordinea indicată.



Scaun rulant cu toaletă JL609GCU

Configurație multifuncțională, cu elemente detașabile

- Cadru din oțel cromat
- Spătar reclinabil
- Tetieră detașabilă
- Șezut decupat în U
- Cotiere detașabile
- Recipient detașabil

Pregătire și montaj

1

Deschideți cadrul



Scoateți produsul din cutie și deschideți complet cadrul scaunului.

2

Montați suporturile



Rotiți fiecare suport pentru picioare până când mecanismul cu arc se blochează.

3

Reglați suporturile



Pliați tălpile și pernele pentru gambe în poziția necesară.

4

Fixați spătarul



Introduceți spătarul până când butoanele cu arc se blochează complet.

5

Așezați șezutul



Fixați placa pe cadru și verificați închiderea cataramelor de prindere.

6

Introduceți recipientul



Glisați recipientul sub șezut și confirmați că este poziționat stabil.

Utilizare, control și întreținere

Efectuați verificarea de stabilitate înainte de fiecare utilizare.

Componente principale



- Tetieră detașabilă
- Mânere pentru spătar
- Frâne de mână
- Cotiere detașabile
- Șezut decupat în U
- Suporturi ridicabile

Înainte de utilizare

- 1 Verificați strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului.
- 2 Confirmați blocarea spătarului, șezutului și suporturilor.
- 3 Controlați frânele și piesele mobile înainte de deplasare.
- 4 Nu utilizați produsul dacă există piese slăbite sau deteriorate.

IMPORTANT

Toate elementele montate trebuie să fie fixate și blocate înainte de utilizare.

Utilizare

1

Pregătire

Verificați cadrul, mecanismele de blocare și șuruburile.

2

Configurare

Reglați tetiera, spătarul și suporturile pentru picioare.

3

După utilizare

Scoateți recipientul, curățați-l și uscați-l complet.

Reglare și poziționare

- Reglați unghiul suporturilor pentru picioare cu mânerle dedicate.
- Pliati tălpile și pernele pentru gambe numai când produsul este staționar.
- Montați sau demontați tetiera și cotierele prin mecanismele proprii.
- Acționați mânerle spătarului controlat, fără mișcări bruște.

Curățare și întreținere

- Curățați frecvent și dezinfectați periodic suprafețele produsului.
- Curățați recipientul după utilizare și uscați-l complet.
- Aplicați periodic o cantitate adecvată de lubrifiant pe piesele rotative.
- Păstrați produsul într-un spațiu uscat și bine ventilat.