

Componente și verificare

Identificați piesele A-T înainte de a începe montajul.



Scaun mobil pentru duș și toaletă JLC00303

Șezut detașabil, recipient inclus și cadru pe roți

● Cadru metalic

● Cotiere mobile

● Roți cu blocare

Lista pieselor A-T

A  Tub șezut Cantitate: 2 buc.	H  Panou spătar Cantitate: 1 buc.	O  Piuliță M6 4 buc.
B  Suport recipient Cantitate: 1 buc.	I  Șaibă arcuită 6 mm 6 buc.	P  Șaibă arcuită Cantitate: 2 buc.
C  Tub lateral Cantitate: 2 buc.	J  Șurub M6 x 30 4 buc.	Q  Șurub M6 x 42 2 buc.
D  Șurub M5 x 35 8 buc.	K  Clemă S Cantitate: 2 buc.	R  Suport picioare Cantitate: 1 buc.
E  Piuliță M5 8 buc.	L  Clemă C Cantitate: 2 buc.	S  Șezut Cantitate: 1 buc.
F  Șaibă Ø5 8 buc.	M  Șurub M6 x 65 2 buc.	T  Recipient cu capac Cantitate: 1 buc.
G  Tub spătar Cantitate: 1 buc.	N  Cotieră Cantitate: 2 buc.	

IMPORTANT


Nu începeți montajul dacă lipsește o piesă sau dacă o componentă este deteriorată.

Asamblare în 5 pași

Folosiți literele din lista de pe pagina 1 pentru identificarea pieselor.

1


Asamblați baza

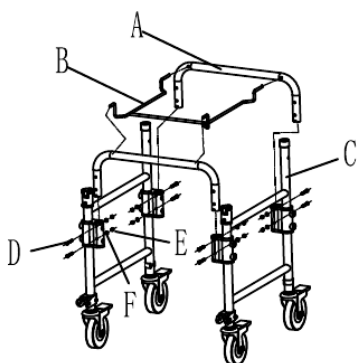

Uniți A, B și C folosind D, E și F.

2


Montați spătarul și cotierele

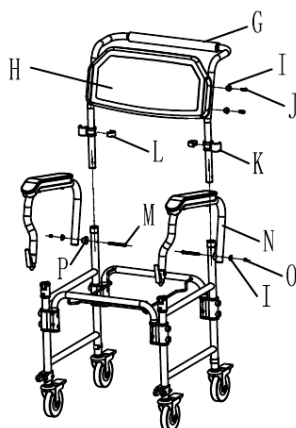

Fixați G-H și cotierele N cu piesele I-P, conform schiței.

3


Fixați suportul pentru picioare

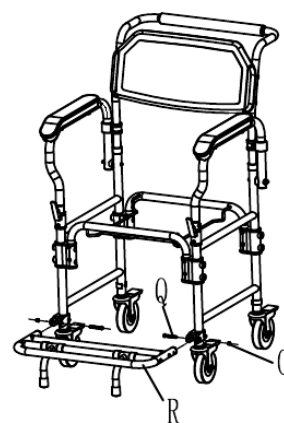

Montați R pe cadru și fixați-l cu Q și O.

4


Montați șezutul

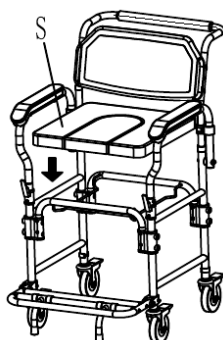

Coborâți șezutul S pe cadru și apăsați până când este stabil.

5

Introduceți recipientul

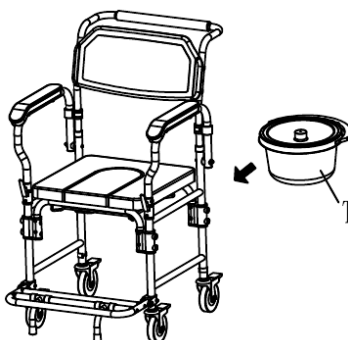

Glisați recipientul T pe suportul B și verificați poziționarea.

IMPORTANT

Strângeți toate fixările și blocați roțile înainte de utilizare.

Siguranță

- Verificați stabilitatea produsului.
- Nu folosiți componente deteriorate.

Curățare

- Scoateți șezutul și recipientul.
- Spălați, clătiți și uscați complet.