

SCAUN CU ROTILE JL901-51

1. COMPONENTE



Detalii despre produs:

Scaun cu rotile din oțel

Lățimea scaunului: 51cm

Cadru din oțel cromat

Cotieră detașabilă

Suportul pentru picioare detașabil

Roata față din PVC 200x50

Roată pneumatică spate de 24"

Scaun și spătar din piele neagră

2. INSTRUIRE

PASUL 1:

Scoate scaunul cu roțile din cutie (Figura 1) și desfaci cadrul (așa cum este arătat în Figura 2).



Figura 1 Figura 2

PASUL 2:

Scoate suporturile de picioare detașabile și cureaua pentru picioare și desface placa pentru picioare (Figura 3).



Figura 3

PASUL 3:

Instalează ambele suporturi laterale, rotește suportul până când catarama arcului se blochează.

Când sprijinul pentru picioare a fost încuiat, s-a auzit un clik sould. (ca Figura 4)



Figura 4

PASUL 4:

Puneți cureaua de picior pe suporturile detașabile pentru picioare (conform Figurii 5)



Figura 5 _____

3. PRUDENȚĂ & ÎNTREȚINERE

- i. Verifică strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului înainte de utilizare.
- ii. Nu depăși capacitatea maximă de greutate de 136 kg.
- iii. Aduă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifianț pe piesele rotative.
- iv. Curățați și dezinfectați regulat și plasați-l într-un mediu uscat și ventilat.