

Înainte de utilizare

Verificați scaunul și reglajele înainte de fiecare utilizare.



Scaun rulant din oțel JL901-51

Cadru cromat pliabil, cotiere și suporturi pentru picioare detașabile, tapițerie neagră.

● Șezut 51 cm

● Roți spate 24 inch

● Max. 136 kg

Pregătire rapidă și intuitivă, fără unelte.

Date esențiale

LĂȚIME ȘEZUT

51 cm

SARCINĂ MAXIMĂ

136 kg

CADRU

oțel cromat

ROȚI SPATE

24 inch

ROȚI FAȚĂ

PVC 200 x 50

TAPIȚERIE

neagră

Verificări rapide

Înainte de deplasare

- Confirmați deschiderea completă a cadrului și a șezutului.
- Testați ambele frâne înainte ca utilizatorul să se așeze.
- Verificați roțile, îmbinările și starea tapițeriei.

Poziționare corectă

- Blocați suporturile pentru picioare în poziția de utilizare.
- Așezați tălpile complet pe plăcile pentru picioare.
- Poziționați cureaua pentru gambe fără a crea presiune.

IMPORTANT

Blocați ambele frâne și verificați stabilitatea înainte de transferul utilizatorului.

Transfer sigur

- Ridicați plăcile pentru picioare înainte de transfer.
- Solicitați ajutor dacă utilizatorul nu se poate transfera singur.

Utilizare sigură

- Nu depășiți sarcina maximă de 136 kg.
- Nu stați în picioare pe plăcile pentru picioare.

Pregătire și utilizare

Nu sunt necesare unelte; verificați blocarea elementelor mobile.

1


Deschideți scaunul



Trageți cadrul în lateral și apăsați marginile șezutului până când acesta este complet deschis.

2

Poziționați suporturile

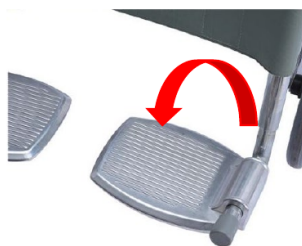

Aduceți suporturile pentru picioare lângă cadrul frontal și coborâți plăcile.

3

Blocați suporturile



Introduceți fiecare suport în locaș și rotiți-l spre interior până când mecanismul se blochează cu clic.

4

Așezați cureaua pentru gambe



Prindeți cureaua între cele două suporturi și verificați poziția plăcilor pentru picioare.

ÎNȚREȚINERE

Curățați și dezinfectați regulat; păstrați scaunul într-un spațiu uscat și ventilat.

Aplicați periodic o cantitate adecvată de lubrifiant pe piesele rotative. Ștergeți surplusul și evitați contactul uleiului cu frânele sau anvelopele.

Înainte de fiecare utilizare, testați frânele și verificați dacă toate fixările sunt complete.